

Bensan Salviettine Body

Care con Crema Barriera 50 salviette

Istruzioni per l'uso:

Le salviette detergenti per il corpo Bensan forniscono pulizia, cura e comfort per i pazienti costretti a letto e in terapia intensiva, compresi i pazienti con bisogni speciali e mobilità ridotta. Apri la confezione tirando la linguetta.

Pulisci l'area.

Si prega di utilizzare una salvietta separata per ciascuna area del corpo. Non c'è bisogno di acqua extra o altri prodotti per la pulizia.

Smaltire secondo le normative sui dispositivi medici del carbone.

Le salviette Bensan Body Care sono utilizzate per prevenire le macerazioni che possono verificarsi su tutti i bordi della ferita.

Avvertenze e pronto soccorso:

Non citare in giudizio il prodotto quando la confezione è danneggiata.

Non utilizzare questo prodotto sulle ferite.

Non riutilizzare.

Non utilizzare questo prodotto per bambini di età compresa tra 0 e 6 mesi.

Durante l'allattamento o la gravidanza, utilizzare sotto la supervisione del medico.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.

Area di utilizzo:

- 1.) Petto
- 2.) Spalla, braccia e mani
- 3.) Area perineale
- 4.) Gambe
- 5.) Parte posteriore della testa
- 6.) Zona posteriore
- 7.) Area dei glutei
- 8.) Piedi

Forno a microonde se necessario.

Istruzioni per l'uso nel microonde:

- 1- Metti la confezione nel microonde.
- 2- Mantieni 20 secondi a 700W
- 3- Non superare i 35-40°C



Ingredienti

Dimeticone copoliolo

Linoleammidopropil PG-cloruro di dimonio fosfato

Lauril glucoside

D-Pantenolo (provitamina B5)

Allantoina

Estratto Aloe Barbadensis

Polisorbato 20

Tetrasodio EDTA

Acido Citrico

Acetato di tocoferile (vitamina E)

Clohexidina Digluconato

Glicerina

Nipaguard

Nome del paziente:

Reparto:

Data:

Prodotto in Turchia

Manufatturato per

Safecare Medical

KIZAD A8-18, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

(+971 2 506 7333

www.bensano.com

info@bensano.com

Numero Articolo: MCV0050

Non riutilizzare

Mantenere asciutto

Tenere lontano dalla luce solare